



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

UniVox[®] DLS30TV

Teleslyngeanlæg med AutoScart og tidsforsinkelse



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit teleslyngeanlæg UniVox[®] DLS30TV.

UniVox[®] DLS30TV teleslyngeanlæg

består af:

Forstærker DLS30

Telepude U12B, sofaslynge eller fast slynge

Strømforsyning

2 stk. klæbende velcroplader

Tilbehør:

Futteral til telepude U12F

Forlængerledning til telepude AT1310750

Indholdsfortegnelse

Installation	4
Sådan installeres UniVox [®] DLS30TV	4
Sådan forbindes UniVox [®] DLS30TV	4
Anvendelse	5
Sådan anvendes UniVox [®] DLS30TV	5
Rengøring	6
Garanti	7

Installation

Sådan installeres UniVox® DLS30TV

Før du går i gang, skal du kontrollere, at dit TV fungerer korrekt sammen med de tilsluttede produkter som video, parabolmodtager, DVD, dekoder, etc. Enhederne skal være forbundet korrekt i serie, som vist herunder.

Når enhederne er korrekt forbundne, skal lyd og billede automatisk skifte til den valgte programkilde. Dette betyder, at hvis du f.eks. tænder for dit video, skal TV'et automatisk skifte til lyd og billede fra videoen. Hvis du tænder DVD'en, parabolmodtageren eller dekoderen, skal billede og lyd fra TV'et automatisk skifte til lyd og billede fra den enhed, du har valgt.

Serieforbindelse



Sådan forbindes UniVox® DLS30TV

Placér telepuden ① i den stol eller sofa, hvor du ønsker at sidde, når du ser TV. Telepuden kan placeres under stolens eller på sofaens pude.

Læg kablet ② fra telepuden på en hensigtsmæssig måde, så den kan nå hen til forstærkeren, der placeres bag ved TV'et.

Det er vigtigt, at placere kablet på en sådan måde, at der ikke er risiko for at falde i kablet.

Forbind kablet til bøsningen på teleslyngeforstærkeren mærket *LOOP-PAD* ③.

Tag scartstikket ud af TV'et og forbind det til forstærkerens scartbøsning ④.

Anvendelse

Forbind teleslyngeforstærkerens scartstik til TV'ets scartbøsning⑤.
Forbind strømforsyningens stik 7 til teleslyngeforstærkerens strømtilslutningsbøsning mærket 12V AC⑥.
Sæt strømforsyningen i stikkontakten⑦ og tænd.

Teleslyngeforstærkeren kan monteres bag på TV'et med de medfølgende klæbende velcroplader.

Extra mulighed: Via 3,5mm stik ⑪ kan der tilsluttes radio, andre lyd-kilder eller tonekald.

Sådan anvendes UniVox® DLS30TV

Sæt høreapparatet/apparaterne på „T“ eller „M/T“, når du skal se TV.

Hvis det er nødvendigt, kan styrken fra teleslyngeanlægget justeres med styrkekontrollen på forsiden af forstærkeren⑧. Under normale omstændigheder er det kun nødvendigt at indstille styrken én gang, da DLS30TV er forsynet med automatisk styrkekontrol.


Til kontrol af funktionen er DLS30TV forsynet med to kontrollamper på forsiden.

Gul lampe⑨ viser ved konstant gult lys, at forstærkeren får strøm fra stikkontakten.

Grøn lampe ⑩ viser med blinkende lys afhængig af program-materialet, du lytter på, at teleslyngeanlægget sender signal til høreapparatet/høreapparaterne.

På nogle fladskærms TV'er kan det forekomme, at lyden i teleslynge og lyden i TV'ets højttaler ikke er synkron. Justér på "TV sync" på fronten (xx) af forstærkeren til lyden er synkron.

Anvendelse

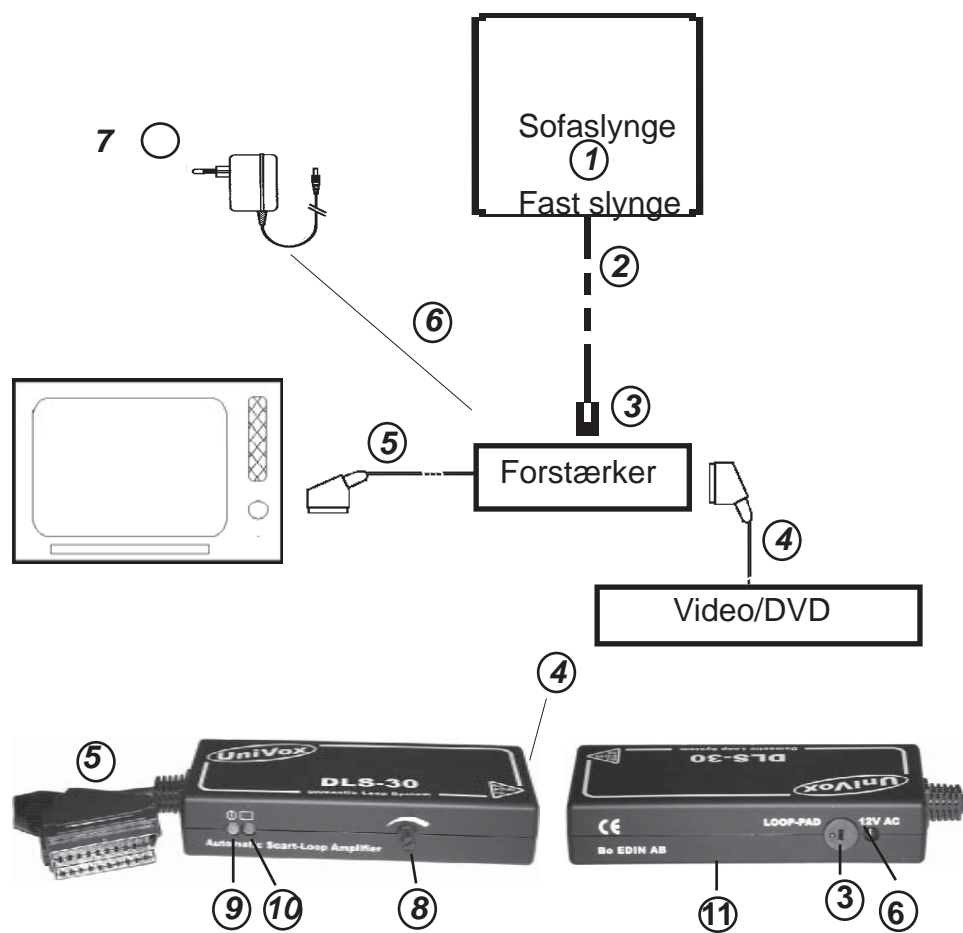

Rengøring

UniVox[®] DLS30TV kan aftørres med en let fugtig klud. Anvend ingen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler.

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationer efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklameretningen gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler

08/11