



Dansk Høreteknik

...lyd giver liv!

Brugervejledning

Sonic Boom

Digitalt vibratorvækkeur



Introduktion

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye vibratorvækkeur.

Tillykke med dit nye Sonic Boom Digitale vibratorvækkeur.

Æsken indeholder:

1 stk. Ur

1 stk. Strømforsyning


1 stk. Vibrator

1 stk. Dansk brugervejledning

Indholdsfortegnelse

Beskrivelse	4
Instruktion	5
Batteri back-up	5
Lysnettilslutning	5
Valg af tidsvisning 12/24 timer	5
Tidsindstilling	5
Indstilling af vækketid	6
Indstilling af alarmtype	6
Slumrefunktion	6
Sluk alarm	6
Indstilling af urets akustiske ringestyrke og tone	6
Pudevibrator	7
Vedligeholdelse	7
Fejlsøgning	7
Garanti	8

Beskrivelse

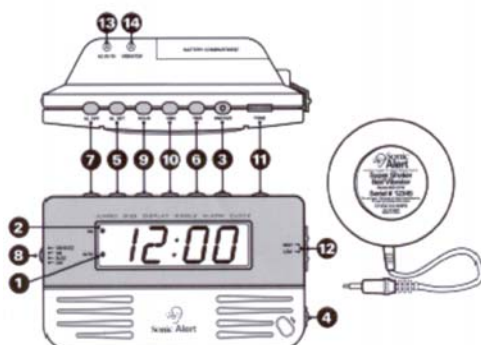

1. Indikering af aktiveret alarm
2. Indikering af tidsvisning (12t/24t omskifter findes på bagsiden)
3. Snooze (vækningsrepetition af alarm)
4. Styrkeregulering
5. Aktivering af indstilling af vækketidspunkt. (Hold knappen nede)
6. Aktivering af indstilling tidspunkt. (Hold knappen nede)
7. Sluk alarm
8. Indstilling af alarmtype
9. Indstilling af timer
10. Indstilling af minutter
11. Tonekontrol
12. Regulering af baggrundsbelysning
13. Tilslutning for strømforsyning
14. Tilslutning for vibrator

Instruktion

Batteri back-up (Batteri er ikke inkluderet)

Ved strømafbrydelse beholdes urets tidsindstilling, såfremt der er isat batteri i batterikammeret på urets bagside. Urets alarmfunktion virker ikke under strømafbrydelsen og displayet er slukket. Uret fortsætter med at gå, så når strømmen vender tilbage, og displayet lyser, viser uret korrekt tidspunkt.

- Åben batterilåget på urets bagside ved at skyde det i pilens retning.
- Sæt et alkaline batteri i uret som vist på illustrationen i bunden af batterikammeret (9V, LR61).
- Sæt batterilåget på plads.

Lysnettilslutning

- Tilslut strømforsyningen til kontakten mærket AC-9V IN på urets bagside.
- Tilslut strømforsyningen til stikkontakten.

Valg af tidsvisning 12/24 timer

Uret leveres indstillet til 24 timer. Visningsformatet kan ændres med knappen mærket HOUR på urets bagside.

Tidsindstilling

Timer

Hold knappen tidsindstilling nede (6) TIME samtidig med, at du trykker på knappen (9) HOUR for at indstille timer.

Minutter

Hold knappen tidsindstilling nede (6) TIME samtidig med, at du trykker på knappen (10) MIN for at indstille minutter.

BEMÆRK!

Slip tidsindstillingsknappen (6) TIME sidst, når du er klar.

Instruktion

Indstilling af vækketid

Timer

Hold knappen tidsindstilling nede (5) AL.SET samtidig med, at du trykker på knappen (9) HOUR for at indstille timer.

Minutter

Hold knappen tidsindstilling nede (5) AL.SET samtidig med, at du trykker på knappen (10) MIN for at indstille minutter.

BEMÆRK!

Slip tidsindstillingsknappen (6) TIME sidst, når du er klar.

Indstilling af alarmtype

VIB BUZZ: Vibrator og akustisk alarm

VIB: Vibrator

BUZZ: Akustisk alarm

OFF: Slukket

Slumrefunktion

Trykker du på knappen SNOOZE (3) oven på uret afbrydes alarmen og aktiveres igen efter 9 minutter.

Sluk alarm

Sæt alarmindstillingsknappen (8) på urets venstre side i stilling OFF for at afbryde alarmen helt eller tryk på knappen (7) AL.OFF oven på uret for at få uret til at vække igen på samme tid dagen efter.

Indstilling af urets akustiske ringestyrke og tone

Anvend knappen VOL (1) på urets højre side for at regulere styrken på den akustiske alarm. Tonen reguleres med knappen TONE (3).

Instruktion

Pudevibrator

Vibratoren tilsluttes kontakten (14) VIBRATOR på urets bagside.

Vælg en af alarminstillingerne som aktiverer vibratoren (VIB BUZZ eller VIB).

Placér vibratoren under puden.

Når alarmen aktiveres vibrerer vibratoren.

BEMÆRK!

Kun den medfølgende vibrator må anvendes.

Vedligeholdelse

Uret kræver normalt ingen vedligeholdelse. Bliver det nusset, kan det aftørres med en let fugtig klud. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Stil ikke uret, hvor det udsættes for stærk varme, sollys eller fugt.

Sørg for god ventilation omkring uret. Uret må ikke overdækkes.

Undgå at tabe ur og vibrator på gulvet.

Fejlsøgning

Kontrollér at alle stik er korrekt og helt isat. Tag evt. stikkene ud og sæt dem ind igen.

Fungerer uret fortsat ikke tilfredsstillende, så kontakt den leveran-

Garanti

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombygning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS
Østervej 6
Postboks 114
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk
www.dh-as.dk

Forhandler