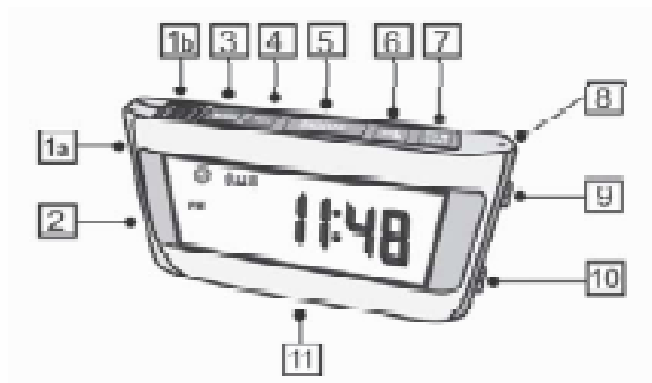




1

**Rejsevækkeur TCL 210 med vibrator og høj ringetone**

## Brugervejledning



- 1a Indbygget lysblink
- 1b Kontakt til lysblink
- 2 Alarmvælger (lyd + vibrator, vibrator, lyd, fra)
- 3 MODE (alarm, tid, temperatur)
- 4 SET, til valg af indstilling
- 5 SNOOZE
- 6 UP ▲
- 7 DN ▼ /TEST
- 8 Fastgørelse af pudeclips
- 9 Toneindstilling
- 10 Alarmstyrke
- 11 Batterikammer (på bagsiden)


### Pakken indeholder:

- Vækkeur
- 3 stk. AA batterier
- Pudeclips
- Brugervejledning

### Installer batterier


Installer de tre AA batterier. Vær opmærksom på at vende dem rigtigt. Et sæt nye alkalinebatterier kan forventes at holde 8 – 10 måneder ved normal brug.

### Indstil tiden

1. Tryk og hold SET i 2 sekunder.  blinker.
2. Først indstilles tidsformatet (24 eller 12 timer).  
Tryk UP ▲ eller DN ▼ for at indstille timer og minutter.  
Bekræft begge ved at trykke på SET.

### Indstil alarm og SNOOZE

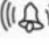

Bemærk: alarmvælgerknappen må ikke indstillet på OFF.

1. Tryk MODE en gang for at gå til indstilling af alarmtid.  
 blinker. Tryk og hold SET i 2 sekunder for at bekræfte.
2. Tryk UP ▲ eller DN ▼ for at indstille timer og minutter.  
Bekræft begge ved at trykke på SET. Herefter blinker SNOZ
3. Hvis du nu trykker på SET er SNOOZE-funktionen aktiveret.  
Hvis du trykker UP ▲ vil SNOZ forsvinde. Hvis du derefter trykker SET er SNOOZE-funktionen slukket.
4. Uret vil automatisk vende tilbage til normal tidsvisning efter ca. 5 sekunder.

Bemærk: Hvis SNOOZE-funktionen er tændt – når alarmen lyder, vil den fortsætte i 40 sekunder og derefter stoppe. Hvis SNOOZE knappen trykkes ned, mens alarmen lyder, vil alarmen stoppe med det samme, men vil starte igen efter 8 minutter. Dette kan gentages op til syv gange. For at stoppe alarmen helt, tryk på en hvilken som helst knap i toppen, bortset fra SNOOZE.

Hvis SNOOZE funktionen ikke er tændt – når alarmen lyder trykkes på SNOOZE for at standse alarmen helt.


## Indstil alarm (til/fra) og alarmtype

1. Sæt alarmvælgerknappen på OFF, for at frakoble den.
2. Skub kontakten til AUDIO , SHAKER , eller ALL (audio + shaker) for at vælge din alarmtype.


## Test din alarmindstilling

1. Tryk og hold DN ▼ /TEST i 3 sekunder – alarmen tændes nu i 10 sekunder og uret går derefter tilbage til tidsvisning.

Brug uret som timer

1. Tryk MODE to gange for at komme til indstilling.  blinker. Tryk og hold SET i 2 sekunder for at bekræfte.
2. Tryk UP ▲ eller DN ▼ for at indstille timer/minutter og bekræft begge med SET.
3. Tryk DN ▼ indenfor 5 sekunder for at starte timer-nedtællingen. H og M blinker og tiden tæller ned. Hvis DN ▼ ikke aktiveres indenfor 5 sekunder går uret automatisk tilbage til normal visning. Bemærk: Når den indstillede timer-tid nås, vil alarmen aktiveres i 30 sekunder. Tryk på en af knapperne i toppen for at stoppe alarmen. For at stoppe timeren inden udløb, tryk på DN ▼.

Vis rumtemperatur

1. Tryk MODE tre gange for at nå til termometeret.  blinker, og temperaturen vises.
2. Hvis nødvendigt, tryk UP ▲ for at skifte mellem °C og °F.
3. Uret går automatisk tilbage til normal tidsvisning efter 5 sekunder.