



Dansk Høreteknik

*...lyd giver liv!*

Brugervejledning

---

## TravelTim

Rejsevibratorur



# **Introduktion**

---

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratur.

Tillykke med dit nye TravelTim rejsevibratur.

Æsken indeholder:

1 stk. Ur

1 stk. LR03 (AAA) batteri

2 stk. LR6 (AA) batteri

1 stk. Dansk brugervejledning

# Indholdsfortegnelse








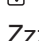

---


<b>Beskrivelse</b>	4
<b>Instruktion</b>	5
Isætning af batterier	5
Indstilling af tid	5
Indstilling af alarm	5
Aktivering af alarm	5
Anvendelse af snooze	6
<b>Generelt</b>	7
Tekniske data	7
Vedligeholdelse	7
Fejlsøgning	7
<b>Garanti</b>	8

# Beskrivelse

TravelTim er et elektronisk ur med digitalt display. Det vækker dig med en akustisk alarm, med blink og/eller vibrationer.

Knappernes funktioner:

-  Display lys/ stop alarm
-  Alarm via lyd, lys og vibrationer
-  Alarm via vibrationer
-  Alarm via lyd og lys
-  Frakobling af alarm
-  Indstil alarm
-  Indstil tid
-  Lås indstillinger
-  Snooze alarm
- 12/24h 12 eller 24 timers visning

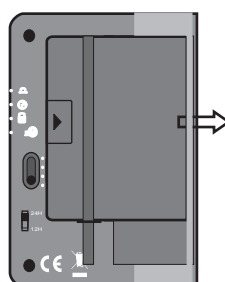

## Isætning af batterier

TravelTim drives af 1 stk. LR03 (AAA) alkaline batteri til display og 2 stk. LR6 (AA) batteri til drift af vibrator. Åbn batterikammeret ved at skyde batteridækslet i pilens retning. Isæt de 3 batterier som vist i batterikammeret.



# Instruktion

---

## Indstilling af tid

Skub den højre indstillingsknap til ⌚ (indstil tid).

Tryk på H og M knapperne til den aktuelle tid.

Efter indstilling, skub knappen til 🔒 (lås).

Vælg 12 eller 24 timers visning med omskifteren 12/24h bag på uret.

Bemærk: Hvis 12 timers visning er valgt, vil displayet vis "PM" i tidsrummet middag til midnat.

## Indstilling af alarm

Skub den højre indstillingsknap til 🔔 (indstil alarm).

Tryk på H og M knapperne til det ønskede alarmtidspunkt.

Efter indstilling, skub knappen til 🔒 (lås).

## Aktivering af alarm

Vælg alarmtype - lyd, lys og vibration 🔔🔊🔦 eller kun vibration 🔔🔦, eller lyd og lys 🔔🔦.

Når alarmen er aktiv, skub den venstre indstillingsknap til 🚫 for at frakoble alarmen. Bliver alarmen ikke koblet fra, vil uret alarmere hver 24. time.

## Anvendelse af Snooze

Vælg alarm.

Skub den højre indstillingsknap til Zzz. Zzz vil blive vist i displayet.

Når alarmen går i gang, tryk ⏸ og nyd yderligere 8 minutters hvile. Zzz vil ikke gentage sig, hvis alarmen alarmerer mere end 1 minut fra start.

Skub den venstre indstillingsknap til 🚫 for at frakoble alarmen.

## ***Instruktion***

---

Bemærk: Kontakten på højre side af uret er for tilslutning af en ekstern vibrator eller til f.eks. et sendermodul.

Dette produkt er ikke stænkæt. Sæt ikke en vandfyldt vase eller noget med åben ild, som f.eks. et tændt stearinlys, på eller tæt ved uret.

# Generelt

---

## Tekniske data

Mål: 95x70x30mm (HxBxD) med basen indfoldet  
Vægt: 130g inkl. batterier  
Strømforsyning: 1x1,5V alkaline batteri LR03 (AAA)  
Farve: Sort/grøn  
Tids- og  
alarmnøjagtighed: 1 minut

## Vedligeholdelse

Uret kræver normalt ingen vedligeholdelse. Bliver uret nusset, kan det aftørres med en let fugtig klud. Anvend aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

Udsæt ikke uret og dermed batterierne for stærk varme som f.eks. sollys, ild eller lignende.

## Fejlsøgning

Kontrollér at alle batterier er korrekt og helt isat.  
Fungerer uret fortsat ikke tilfredsstillende, så kontakt den leverandør, hvorfra du har modtaget uret.

# Garanti

---

Dansk Høreteknik HJM ApS yder til vores kunder 2 års reklamationsret efter købeloven fra leveringstidspunktet. Såfremt eventuelle fejl ikke skyldes nedenstående forhold, vil reparationer eller ombytning i reklamationsperioden være uden beregning. Vi gør opmærksom på, at kvittering er gyldigt garantibevis.

Reklamationsretten gælder ikke ved batterifejl, misbrug- eller uforsigtig anvendelse af produktet, tordenvejr eller anden force majeure samt øvrige forhold, der ikke skyldes oprindelige fejl ved produktet.

Dansk Høreteknik HJM ApS yder ikke garanti, såfremt der er foretaget fejlagtig tilslutning/montering eller u hensigtsmæssig opbevaring eller øvrige forhold, som kan tilregnes uautoriseret anvendelse, reparation eller ændring af produktet.

Skulle der opstå et problem med produktet, anbefaler vi at De gennemgår fejlsøgningskemaet, hvis et sådant findes i brugervejledningen til Deres produkt. Kan problemet ikke løses ved hjælp af fejlsøgningskemaet tilråder vi, at De henvender Dem til det sted, hvorfra De har fået produktet leveret. Forhandleren vil da kunne hjælpe Dem med reparationsproceduren.

Ved indsendelse direkte til Dansk Høreteknik HJM ApS gør vi opmærksom på, at kunden afholder alle indleveringsomkostninger, mens returneringsomkostninger afholdes af Dansk Høreteknik HJM ApS. For at nedsætte reparationstiden, skal produkter, som indsendes til Dansk Høreteknik HJM ApS, ledsages af en præcis fejlbeskrivelse (få eventuel hjælp hos forhandleren), navn, adresse, telefonnummer samt en kopi af Deres faktura.

Der henvises i øvrigt til vores til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres ved henvendelse på telefon 4717 5598.

Dansk Høreteknik HJM ApS  
Østervej 6  
Postboks 114  
3650 Ølstykke

Tlf.: 4717 5598  
Fax: 4717 5588

dh-as@dh-as.dk  
www.dh-as.dk

Forhandler