




Amplicomms

Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning



Brugervejledning

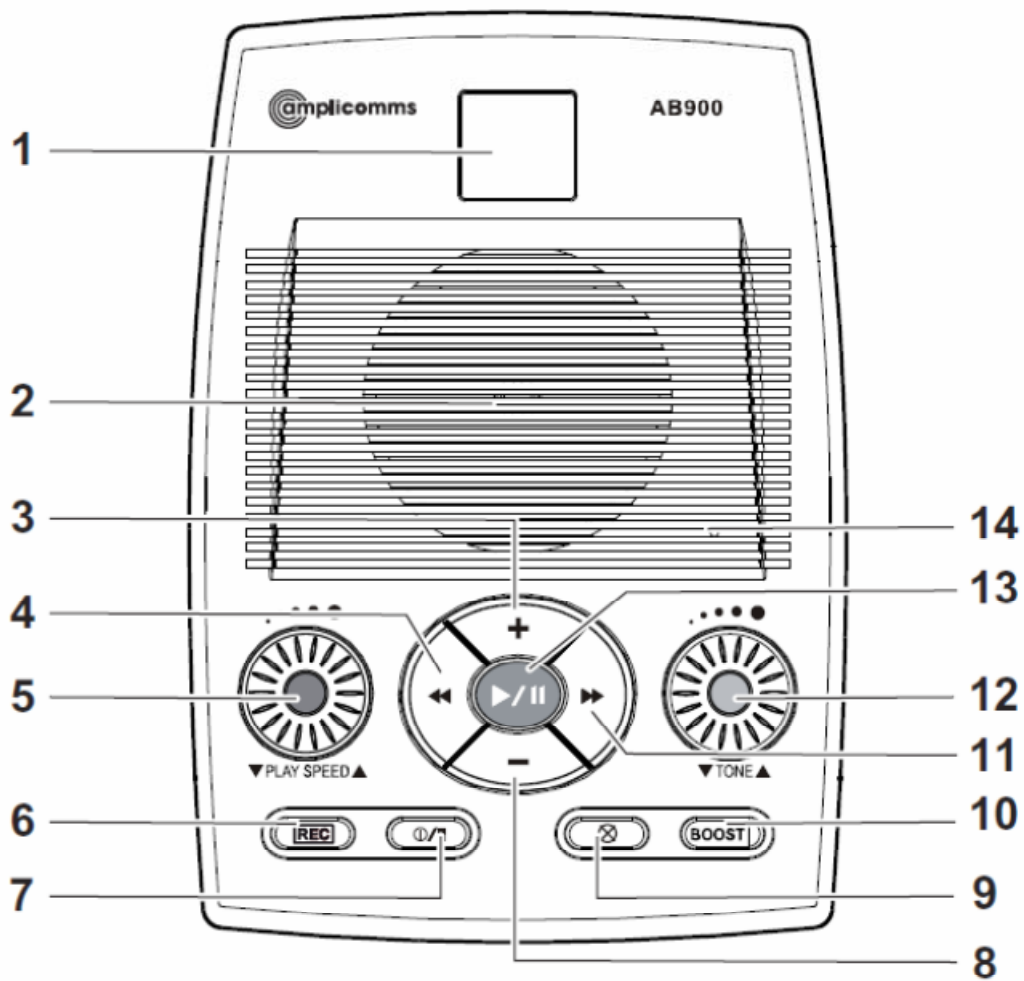

- 1. Display
- 2. Højtaler
- 3. Forøg lydstyrken
- 4. Forrige besked
- 5. Justér hastigheden
- 6. Optag
- 7. Tænd/sluk, stop afspilning

- 8. Reducér lydstyrken
- 9. Slet
- 10. Forstærkning til/fra
- 11. Næste besked
- 12. Justér tonen
- 13. Afspil/pause
- 14. Mikrofon

Æsken indeholder:

- 1 Telefonsvarer
- 1 Strømforsyning
- 1 Telefonledning og stik
- 1 Brugervejledning

Brug med hovedtelefon:

Du kan tilslutte et sæt hovedtelefoner til telefonsvareren (medfølger ikke). Tilsluttes på bagsiden i 3,5 mm. Mimi-jack indgangen.

Tilslutning af telefonsvareren:

Tilslut telefonsvareren som vist nedenfor



Displayet:

- - Lyser konstant: telefonsvareren er ikke tændt.
- - Blinker på skift med **00** eller et andet nummer: telefonsvareren er tændt, men dag og klokkeslæt er ikke indstillet.

00 til **99** Lyser konstant: antal af beskeder, der allerede er blevet aflyttet, men ikke slettet.

00 til 99 Blinker: antal af beskeder, der endnu ikke er aflyttet.


Al Blinker: 10 sekunders optagetid tilbage.

FL Lyser konstant: hukommelse opbrugt, der tages ikke flere beskeder.

Ibrugtagning:

Første gang du bruger telefonsvareren, bør du indstille dag og tid. Bemærk: standardsproget er engelsk.



Vælg andet sprog:

(Dansk er ikke en mulighed). Tryk  i ca. 2 sekunder. Displayet viser den nuværende indstilling (f.eks. En = engelsk)



Vælg sprog ved gentagne gange at trykke  . Tryk derefter  for at bekræfte valget.

Indstil dag og tid:

Tryk  i ca. 2 sekunder. Du hører nu den aktuelle indstilling, og displayet viser et tal der indikerer dagen

(mandag = 1, tirsdag = 2 osv.). Tryk  gentagne gange, indtil den korrekte dag vises. Tryk derefter  for at bekræfte valget.

Timetallet bliver nu oplæst og vist i displayet. Tryk  gentagne gange, indtil den korrekte tid vises i displayet. Tryk  for at bekræfte.

Minutterne oplæses og vises i displayet. Tryk  gentagne gange, indtil det korrekte minuttal vises i displayet. Tryk  for at bekræfte valget.

Bemærk: Hvis der er en pause på mere end 20 sekunder ved valg af sprog, eller under indstillingen af dag og tid, afbrydes programmeringen.

Indstil det antal gange telefonen skal ringe, inden telefonsvareren skal starte. Dette gøres med skydeknappen bagpå telefonsvareren. (2 = 2 ringesignaler, 6 = 6 ringesignaler, TS = toll saver).

(Toll saver: Bruges hvis du fjernbetjener maskinen. Med denne indstilling kan du undgå at betale samtaleafgift, hvis du ringer til telefonsvareren udefra, for at undersøge om der er beskeder. Se senere om fjernbetjening).

Din telefonsvarer er nu klar til brug.

Du kan indtale en personlig besked, i stedet for den forud indtalte. (Se senere om dette).


Dag og tid kan kontrolleres ved at trykke  .

Beskeder:

Den maksimale længde på en indgående besked er 120 sekunder. Hvis der er en pause på mere end 7 sekunder når der indtales besked, afbrydes der med en tone.


Den totale kapacitet på indgående beskeder, og din egen udgående besked er ca. 20 minutter.

Aflyt indgående beskeder:


Højtaleren gør det muligt at lytte til et opkald, uden at tage telefonen. Hvis du ikke ønsker at lytte med, sænkes lydstyrken ved at trykke  gentagne gange.

Afbryd telefonsvareren:

Du kan altid afbryde telefonsvareren, mens en besked modtages. Du skal blot løfte telefonrøret og trykke

 på telefonsvareren. Maskinen stopper, og du kan tale direkte med den der har ringet op.

Afspil beskeder:


Tryk  én gang for at aflytte indkomne beskeder. Maskinen afspiller nu de nye beskeder. Hvis der ikke er nye beskeder, vil alle gemte beskeder blive afspillet. Hvis der ikke er gemte beskeder, hører du nogle signaltoner.

For at afbryde aflytningen midlertidigt, tryk  . Ved at trykke  igen indenfor 7 sekunder, kan du genoptage aflytningen.


For at afslutte aflytningen, tryk  .

Når den sidste besked er afspillet afgiver maskinen to signaltoner.

Muligheder under aflytning:

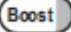
Under afspilning kan højttalerstyrken forstærkes op til +40 dB ved at trykke . (Indikatorlampen tændes).

Drejeknappen "Tone" (Gul) kan justere lyden, mens forstærkningen er aktiveret.

Forstærkningen afsluttes ved endnu et tryk på .


Hastigheden på en indtalt besked kan justeres på drejeknappen "Play speed" (Rød).

Gentag en besked:


Tryk  for at gentage den aktuelle besked.

Tryk og hold  indtil du hører en signaltone for at gentage den forrige besked.


Spring til næste besked:

Tryk  for at springe til den næste besked.

Slet den aktuelle besked:

Tryk  for at slette den aktuelle besked, mens beskeden afspilles.


Slet alle beskeder:


Når den sidste besked er afspillet hører du to signaltoner. Tryk nu  indtil du hører endnu en signaltone. Alle beskeder bliver nu slettet.


Udgående beskeder:

Der er på forhånd indtalt en standardbesked (dog ikke på dansk). Du kan optage din egen udgående besked. Den skal være mindst 3 sekunder, og må ikke være længere end 60 sekunder. Når du har optaget en besked, bruges denne automatisk.


Optage:

Tryk  indtil du hører en signaltone. Hold knappen nede og indtal din besked. Hold en afstand på ca. 15 cm. Til mikrofonen.

Displayet viser .

(Hvis du indtaler en lang besked, vil displayet efter ca. 50 sekunder blinke , for at vise at du har ca. 10

sekunder tilbage af din besked).

Slip  når du er færdig med at indtale din besked. Beskeden vil nu blive afspillet.

Slet din personlige udgående besked:

Tryk og hold  til du hører en signaltone. Slip .

Din personlige besked er slettet. Den forud indtalte besked vil blive afspillet.

Fjernbetjening:

Fra de fleste telefoner kan du ringe til din telefonsvarer, for at aflytte beskeder.

Din telefonsvarer har en trecifret kode, som står i bunden af den. Denne skal bruges ved fjernbetjening.

"Toll saver":

Hvis du har indstillet skydeknappen bag på telefonsvareren til "TS", kan du uden samtaleafgift aflytte om der er beskeder.

Ring til din egen telefon, fra en ekstern telefon.

Hvis der er nye beskeder, besvares dit opkald efter to ringetoner. Hvis der ikke er nye beskeder, besvares dit opkald efter seks ringetoner. Du kan derfor lægge på efter den tredje ringetone, og derved undgå samtaleafgiften.

Brug af fjernbetjening:

Ring til din egen telefon, og afvent tonen efter den udgående besked. Indtast din trecifrede kode. Når du har indtastet den korrekte kode, modtager du en bekræftelse i form af to toner.

Du har nu følgende muligheder:

(Der må ikke gå mere end 20 sekunder mellem de enkelte indtastninger, ellers afbrydes der automatisk).

0 # Aktivér telefonsvarerens mikrofon (rumaflytning).

2 # Afspil alle optagede beskeder.

2 5 Afspil kun nye beskeder.

Under afspilningen har du følgende muligheder:

7 # Spring til næste besked.

8 # Gentag aktuel besked.

6 # Spring tilbage til forrige besked.

3 # Slet aktuel besked.

Stop afspilning.

Efter afspilning af sidste besked høres nogle toner. Indenfor de næste 20 sekunder har du følgende muligheder:

8 # Optag en besked (Indgående besked, memo).

2 # Gentag alle beskeder.

3 # Slet alle beskeder.

9 # Sluk telefonsvareren.

Indtal ny udgående besked via fjernbetjening:

Ring til dit eget nummer, og vent på tonen efter den udgående besked.

Indtast din trecifrede kode. Den korrekte kode bekræftes af to toner.

Tryk 7 #

Indtal din nye udgående besked efter tonen. Afslut ved at trykke 7 # igen.

Den nye besked afspilles nu.

Tænd telefonsvareren via fjernbetjening:

Ring til dit eget nummer, og vent på en signalton (efter ca. 10 ringetoner).

Indtast din trecifrede kode. Den korrekte kode bekræftes af to toner.

Tryk 9 # . Afslut opkaldet.

Slet meddelelser via fjernbetjening:

Ring til dit eget nummer, og vent på signaltonen (efter ca. 10 ringetoner).

Indtast din trecifrede kode. Koden bekræftes af to toner.

For at lave plads, skal du aflytte beskeder og slette dem individuelt, eller slette alle (se tidligere).

Telefonsvareren rengøres med en tør klud.

Undgå brug af stærke rengøringsmidler, eller opløsningsmidler.

Brug udelukkende den strømforsyning, der medfølger til apparatet.



Scantone A/S, Stestrupvej 86 B, 4360 Kr. Eskilstrup. Tlf. 46 19 51 00

www.scantone.dk